




## 羊水試棒

Amnicator®

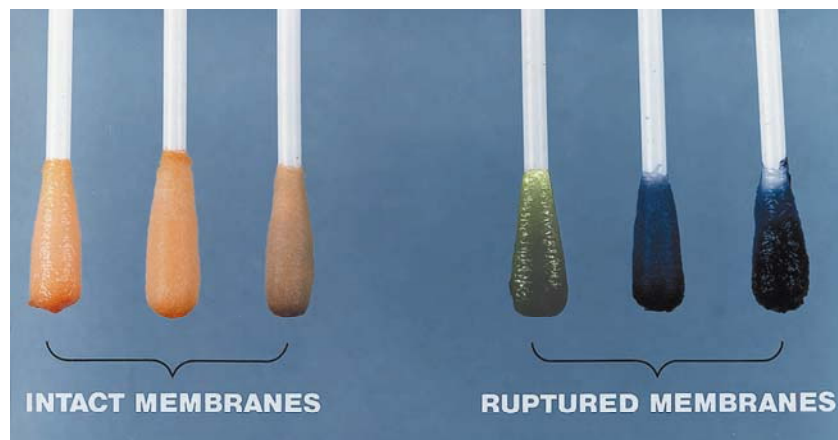

羊水試棒-Amnicato® 是一種快速安全而且簡便的方法供測定羊膜是否破裂。羊水試棒-Amnicato® 單支包裝在無菌的包裝中無菌的拭子飽含著一種敏感的 PH 指示劑(Nitrazine yellow)。這個羊水試驗的原理是根據正常陰道的 PH 值範圍是介於 4.5-6.0 之間，而羊水的 PH 值介於 7.0-7.5 之間。憑藉著羊水試棒-Amnicator 中的 PH 指示劑(Nitrazine yellow)在 PH 值 6.4-6.8 之間有著非常敏銳的顏色改變，而且這個範圍正好介於其他兩個 PH 範圍之間，使得婦產科醫生可以正確的測出羊水的存在。羊水試棒-Amnicator® 可以很正確的從酸性的子宮頸，陰道黏液，或尿液中鑑別出任何微量的中性或微鹼性的羊水。

使用無菌的鴨嘴開大器置入陰道然後將一支羊水試棒伸入陰道中，在子宮頸口裏的任何液體或陰道穹窿後面混合的液體中取樣。然後抽出羊水試棒檢查顏色的改變。任何少量的羊水都足以改變這個 Nitrazine yellow 指示劑的顏色。從正常的分泌物和尿液中鑑定漏出的羊水，羊水試棒-Amnicato® 都比那些憑藉著顯微鏡檢查漏出的液體，測定是否含有蛋白質或使用口服的染色液來染尿液等更為快速簡便。

包裝：一包 100 支，每支個別包裝在無菌真空包裝中。