



### Instrucciones de uso

- 1) Limpiar la vulva y el orificio vaginal para evitar las contaminaciones susceptibles de falsear el resultado
- 2) Insertar espéculo en la vagina para exponer el cuello del útero
- 3) Introducir el Amnicator® y recoger, aplicando durante 5 minutos, cualquier líquido al nivel de la parte posterior de la vagina o alrededor del orificio cervical
- 4) Sacar el Amnicator® y observar el color de la contera después de 5 segundos (hasta 30 segundos)
- 5) Interpretar el resultado con la escala de colores

### Interpretación

MEMBRANA INTACTA	MEMBRANA ROTA
pH 5,0 amarillo	pH 6,5 verde-oliva
pH 5,5 amarillo	pH 7,0 azul
pH 6,0 amarillo/verde palido	pH 7,5 azul-negro



## **Limites**

Dado que el Amnicator es un test de evaluación del pH, la presencia de contaminación vaginal es susceptible de dar resultados falsos

Todo lo que puede bajar o incrementar artificialmente el pH puede ocasionar resultados falsos negativos o falsos positivos :

- Infección vaginal (en particular Trichomonas Vaginalis o Cocci gram plus)
- Presencia de semen (pH entre 7,3 y 7,5)
- Conminación con orinas alcalinas o ácidas (infecciones urinarias)
- Antibioterapia (modificación de la flora con ya alcalinización, ya acidificación)
- Utilización excesiva de jabón o antiséptico locales de pH alcalino a excepción de la Clorhexidina, algunas cremas o algunos líquidos ginecológicos utilizandolos con moderación